

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer C510010-C510015

Classic

Nitrilhandsker, pudderfri

Blå



Beskrivelse

Pudderfri

Usteril

Blå

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU regulativet for medicinsk udstyr EU 2017/425 klasse I og PPE regulativ EU 2016/425, CAT. III Type B certificering

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 16523-1:2015

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420:2003 + A1:2009

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer C510010-C510015

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: Ved 10-30°C

Håndtering: Undgå varme, fugt, direkte sollys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning 6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton

Strækkevne:

Før belastning min. 500%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

Tykkelse

Håndfladen 0,08 mm

Fingrene 0,09 mm

Varenr.	Str.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)	Forpakning stk/kolli
C510010	X-small	5-6	75	240	100/1000
C510011	Small	6-7	85	240	100/1000
C510012	Medium	7-8	95	240	100/1000
C510013	Large	8-9	105	240	100/1000
C510014	X-Large	9-10	115	240	100/1000

Test udført

Luft og vand

Sensibiliseringstest

Irritationstest

Cytotoksitet

Restkemikalier

Brudstyrke

Pudderrester

Virusgennemtrængning

Bakterie og svampe

Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)

Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater)

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer C510010-C510015

Kemikalie gennemtrængning

Chemical	CAS number	Permeation time	Level
Ammonium hydroxide 25% (O)	1336-21-6	<10 min.	0
Sodium hydroxide 40% (K)	1310-73-2	>480 min.	6
Formaldehyde 37% (T)	50-00-0	>240 min.	5
N-Heptane (J)	142-82-5	<10 min.	0
Hydrogen peroxide 30% (P)	7722-84-1	>30 min.	2

Test method used: EN16523-1:2015

Cytostatica

Carmustine 3.300 ppm	>240 min.	5
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Flourouracil – 50.000 ppm	>240 min.	5
Mechlorethamine HCl 1.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
Thio-Tepa 10.000 ppm	29,2 min.	1
Vincristine sulfate 1.000 ppm	>480 min.	6

Test method used: ASTM D 6978-05

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevarer ^{*4}	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.